

エステマシン使用上の禁止事項と注意

ご利用になるお客様は必ず事前にお読みください。

以下のいずれかに当てはまる方は**使用しないでください**

医療用電子機器 (ペースメーカー、人工心肺、心電計等) を使っている	心臓疾患がある	妊娠中・妊娠の可能性がある
授乳中	月経中	血液異常 (血液凝固障害や血友病疾患等)
悪性腫瘍	医療特定疾患 (膠原病等)	糖尿病
甲状腺疾患	肝臓機能障害	出血や内出血の可能性のある方

以下のいずれかに当てはまる方は**必ず医師と相談上ご使用ください**

原爆症	急性疾患	結核性疾患	アレルギー疾患	法定伝染病	顔面黒皮症	38度以上の有熱性疾患
喘息や気管支疾患	特に肌が敏感な方 (ケロイド体質、アトピー性皮膚等) や皮膚疾患 (ヘルペス等)				アルコール中毒	
局所性、全身ステロイド系、非ステロイド系抗炎症薬やステロイド系ホルモン剤の使用					血圧異常	過去の疾病
体調が優れない方 (激しい疲労感)		通院中や服薬がある方		薬物やホルモン治療		

以下の部位には**使用しないでください**

粘膜・口内・眼球	心臓の近く	整形手術をした部位	ヒザ・ヒジなどの関節部位	傷口や脱毛・日焼け直後の部位
痛覚・知覚障害を起こしている部位	金属・プラスチック・シリコン等の埋め込み部位		ニキビ・吹き出物等炎症がある部位	
化粧品などによる皮膚炎症がある部位	アトピー・湿疹などの症状がある部位		痒みや火照りを伴う病的なシミがある部位	
首の頸動脈付近	時計や貴金属を装着している部位 (アクセサリー等は外して使用してください)			

その他注意事項

- 必ず指定しておりますクリーム、ローション、ジェルをご使用ください。
- 使用する前に指定しておりますクリーム、ローション、ジェルを必ず手のひらに塗り、プローブヘッドをあてて温度を確かめてください。
- 1部位30分以上はマシンを当てないでください。
- 異常に熱い場合等、異常を感じた場合には使用を止めてください。
- 使用上の注意を守らずに起こったマシンの故障・火傷や皮膚トラブルなどの事故が発生した場合、当店の過失によらないものについては責任を負いかねます。
- 治療中の傷や体内に金属・樹脂・シリコン等を埋め込んだ部位の周囲には使用しないでください。
- 空腹時は避けてください (目安: 食後1時間以上)。
- 火傷には十分ご注意ください。
- マシン使用中は必ずサングラスを着用してください。目に障害を与える恐れがあります。
- マシン使用中に皮膚に塗布したクリームが乾いてしまった場合は必ず足してください。足りない場合は火傷をする可能性があります。
- 各ヘッドは肌に全面を密着させ、一か所に留めないように動かしてください。
- 各ヘッド使用後は速やかに電源をお切りください。
- マシンの掃除には、次亜塩素酸水を使用してください。アルコールは故障の原因となるため、使用しないでください。
- 雷が鳴った場合は直ちに使用を中止してください。
- マシン使用中に携帯電話等の電子機器、その他所持品の故障があった場合、当店は一切責任を負いません。
- 各マシンの効果等については個人差があります。
- マシンを使用された日は極端な高温での入浴・サウナ・岩盤浴等身体に負担がかかりすぎる行為は避けてください。
- マシン使用は毎日でも可能ですが、同じ部位への使用は中1日開けてください。
- マシンを1時間以上使用する場合は、約10分程度電源を切り再度ご使用ください。
- コードは引っ張ったり、無理にネジ曲げたり、巻きつけたりしないでください。
- 本体や操作パネルを濡らさないでください。



以上を守らずにマシンを使用して発生したトラブルは当店の過失による物ではない限り責任を負いかねますので予めご了承ください。

脱毛器使用上の禁止事項と注意

ご利用になるお客様は必ず事前にお読みください。

当店の脱毛器はV・I・Oゾーンへの使用は禁止とさせていただきます。
何卒ご了承ください。

※Vゾーン=恥骨上部の下着で覆われている三角形のゾーン / Iゾーン=陰部の両側 / Oゾーン=肛門周辺

以下のいずれかに当てはまる方は使用しないでください

医療用電子機器 (ペースメーカー、人工心肺、心電計等) を使っている

皮膚知覚障害

妊娠中・妊娠の可能性がある

授乳中

月経中

アトピー性皮膚炎・湿疹・ヘルペス等皮膚疾患がある

太陽光で肌が荒れやすい

アレルギー体質

化粧品・衣類・金属などに被れやすい体質

成長期の子供

以下の部位には使用しないでください

目・目と眉の周り・耳・唇・首・頭

乳首・乳輪・へそ

肝斑 (かんぱん)、シミ、ほくろなど暗褐色または黒色の肌部分

かさぶた・傷・あざがある箇所

湿疹・かぶれなどの症状がある部位

ニキビ・吹き出物等炎症がある部位

虫刺され

タムシ (白せん)

毛のう炎・毛包炎

皮膚がん

血管腫

いぼ

美容整形をした部位

入れ墨がある部位

甲状腺上

日焼けした肌

時計や貴金属を装着している部位 (アクセサリー等は外して使用してください)

その他注意事項

- 体調がすぐれないときや、肌・体に異常を感じる時は使用しないでください。
- 入浴直後等の肌に赤みやほてりが残っているときは使用しないでください。
- 同じ個所に繰り返し照射しないでください。
- ムダ毛を目立たなくする効果が感じにくい場合でも、3日に1回を限度に使用してください。
- 使用上の注意を守らずに火傷や皮膚トラブルなどの事故が発生した場合、当店の過失によらないものについては責任を負いかねます。
- 火傷には十分ご注意ください。
- 効果には個人差があります。
- 脱毛効果を実感いただくには、長期に渡り複数回照射する必要があります。
- 本体やコントローラーを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 濡れた肌には使用しないでください。
- 衣類や髪の毛に照射しないでください。
- 薬を服用されている人は、服用後、1週間はあけてください。
- 薬を継続して服用されている人は皮膚科医に相談してください。
- 素肌 (メイクや日焼け止め、香水等を洗い流した状態) に使用してください。
- 肌に炎症 (赤くなるなど) が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合は、皮膚科医に相談してください。
- ご使用前にはアタッチメントや発光面に变形・割れ・破損が無いか確認してください。
- 使用中は必ずサングラスを着用してください。目に障害を与える恐れがあります。
- 本体やコントローラーを濡らさないでください。
- 本体・コントローラーの掃除には、次亜塩素酸水を使用してください。アルコールは故障の原因となるため、使用しないでください。
- 電源を切った後、ファンが停止するまで、コンセントから電源プラグを抜かないでください。
- 照射時に目に一時的な刺激を感じることがあります。
- 顔に照射する時は、目を閉じてください。
- 出力レベルはLv1など、弱い設定から試してください。いきなり強い出力での照射はお控えください。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
- コードを無理にネジ曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 水に付けたり、水洗いは絶対にしないでください。



以上を守らずにマシンを使用して発生したトラブルは当店の過失による物ではない限り責任を負いかねますので予めご了承ください。