


エステ機器の使い方

各部の説明

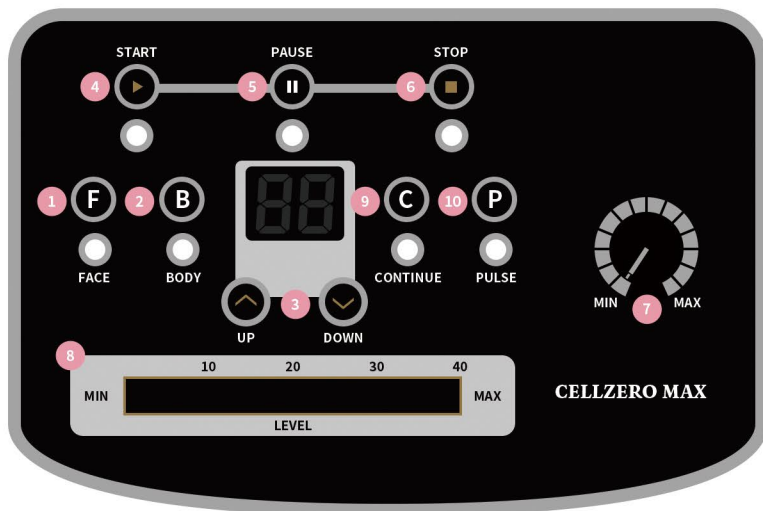

1 2 ヘッド選択

FACE (顔)/BODY (体)
使用したいヘッドのボタンを選択します。



3 時間設定

UP/DOWNで選択します。5分単位で設定が可能です。
使用時間が終わるとブザーと共に動作が停止します。

4 5 6 操作ボタン

START：動作開始時

※STARTを押す前にレベル調節レバーがMINになっていることを確認してください。

STOP：停止

PAUSE：一時停止 / 再開

※一時停止時、もう一度押すと再開します。STOP：動作停止

7 8 レベル設定

動作開始時に、7のレベル調節レバーをMINとMAXの方向に回転するとレベルの調節が可能です。

レベルの回転とともに、レベル確認メモリにLEDで表示されます。

※FACE：レベル6~8 / BODY：レベル20まで これ以上は上げないようにしてください。

必ず低いレベルからスタートし、徐々に上げてご使用ください。

9 10 出力設定

こちらの「C」「P」ボタンは触らないでください。

使用前の準備



1 メイク等を落とす(顔に使用する場合)

エステ機器は素肌で使用してください。素肌とはメイクや日焼け止め、香水などを洗い流し、化粧水や保湿剤などもついていない状態です。



2 水を飲む

施術前にコップ一杯の水を飲みます。(老廃物が流れやすくなります。)

パッチテストについて

マシン専用クリームとエステ機器の組み合わせが肌に合わない場合もあるため相性チェックをお願いします。肌トラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。

- ①パッチテストを行う部位をせっけんで洗い、タオルなどでふき取り水気を取る
- ②マシン専用クリームをつける
※クリームが半透明になるくらいまで塗り伸ばす
- ③電源を入れて塗布部にあてる

使用方法



- 1 エステ機器本体裏にある赤い電源スイッチをONにします。




- 2 F=顔 B=体
使用したい方のボタンを押します。



- 3 レベル調節レバーが必ずMINになっていることを確認し、STARTを押します。



- 4 顔の場合は6~8くらいで、体の場合は20までレベル調節レバーを回します。

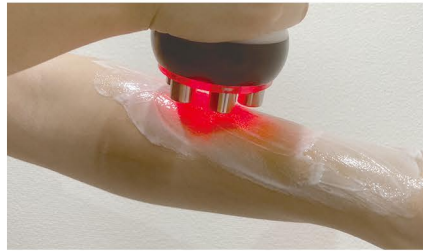

- 5 専用クリームを塗り、ヘッドの突起が全て触れるようにしてあてます。このときヘッドを動かしながら当ててください。



- 6 使用後は次亜塩素酸水を吹きかけたティッシュまたはウェットシートで使用部分を優しく拭いてください。



- 7 施術後にもコップ一杯の水を飲みましょう。(老廃物が流れやすくなります)

アルコールスプレー・石けん等は故障の原因となるため、使用しないでください。

光について



FACE (顔) 用は青い光

- ▶ 鎮静・殺菌効果
ニキビの改善・コラーゲンを生成



BODY (体) 用は赤い光

- ▶ あたためてほぐす・コラーゲンを生成
血行促進・ハリUP・引き締め

注意事項

- 必ず指定しておりますクリーム、ローション、ジェルをご使用ください。
- 使用する前に指定しておりますクリーム、ローション、ジェルを必ず手のひらに塗り、プローブヘッドをあてて温度を確かめてください。
- マシン使用中に皮膚に塗布したクリームが乾いてしまった場合は必ず足してください。足りない場合は火傷をする可能性があります。
- レベルが強ければ効果が出るというものではありません。強い出力で当てすぎると脂肪が溶けにくくなります。必ず低いレベルからスタートし、徐々に上げてご使用ください。