

脱毛器使用上の禁止事項と注意

ご利用になるお客様は必ず事前にお読みください。

当店の脱毛器はV・I・Oゾーンへの使用は禁止とさせていただきます。
何卒ご了承ください。

※Vゾーン=恥骨上部の下着で覆われている三角形のゾーン / Iゾーン=陰部の両側 / Oゾーン=肛門周辺

以下のいずれかに当てはまる方は使用しないでください

医療用電子機器 (ペースメーカー、人工心肺、心電計等) を使っている

皮膚知覚障害

妊娠中・妊娠の可能性がある

授乳中

月経中

アトピー性皮膚炎・湿疹・ヘルペス等皮膚疾患がある

太陽光で肌が荒れやすい

アレルギー体質

化粧品・衣類・金属などに被れやすい体質

成長期の子供

以下の部位には使用しないでください

目・目と眉の周り・耳・唇・首・頭

乳首・乳輪・へそ

肝斑 (かんぱん)、シミ、ほくろなど暗褐色または黒色の肌部分

かさぶた・傷・あざがある箇所

湿疹・かぶれなどの症状がある部位

ニキビ・吹き出物等炎症がある部位

虫刺され

タムシ (白せん)

毛のう炎・毛包炎

皮膚がん

血管腫

いぼ

美容整形をした部位

入れ墨がある部位

甲状腺上

日焼けした肌

時計や貴金属を装着している部位 (アクセサリー等は外して使用してください)

その他注意事項

- 体調がすぐれないときや、肌・体に異常を感じる時は使用しないでください。
- 入浴直後等の肌に赤みやほてりが残っているときは使用しないでください。
- 同じ個所に繰り返し照射しないでください。
- ムダ毛を目立たなくする効果が感じにくい場合でも、3日に1回を限度に使用してください。
- 使用上の注意を守らずに火傷や皮膚トラブルなどの事故が発生した場合、当店の過失によらないものについては責任を負いかねます。
- 火傷には十分ご注意ください。
- 効果には個人差があります。
- 脱毛効果を実感いただくには、長期に渡り複数回照射する必要があります。
- 本体やコントローラーを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 濡れた肌には使用しないでください。
- 衣類や髪の毛に照射しないでください。
- 薬を服用されている人は、服用後、1週間はあけてください。
- 薬を継続して服用されている人は皮膚科医に相談してください。
- 素肌 (メイクや日焼け止め、香水等を洗い流した状態) に使用してください。
- 肌に炎症 (赤くなるなど) が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合は、皮膚科医に相談してください。
- ご使用前にはアタッチメントや発光面に变形・割れ・破損が無いか確認してください。
- 使用中は必ずサングラスを着用してください。目に障害を与える恐れがあります。
- 本体やコントローラーを濡らさないでください。
- 本体・コントローラーの掃除には、次亜塩素酸水を使用してください。アルコールは故障の原因となるため、使用しないでください。
- 電源を切った後、ファンが停止するまで、コンセントから電源プラグを抜かないでください。
- 照射時に目に一時的な刺激を感じることがあります。
- 顔に照射する時は、目を閉じてください。
- 出力レベルはLv1など、弱い設定から試してください。いきなり強い出力での照射はお控えください。
- 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
- コードを無理にネジ曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 水に付けたり、水洗いは絶対にしないでください。



以上を守らずにマシンを使用して発生したトラブルは当店の過失による物ではない限り責任を負いかねますので予めご了承ください。